

Sistema portátil de bucle inductivo

LA-90 y LA-90 Set





En las comunicaciones habladas, el »LA-90« facilita la recepción auditiva sin barreras.

Transmisión por inducción a audífonos e implantes cocleares



HUMANTECHNIK – Su partner para productos de audiolología

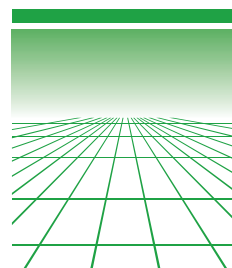

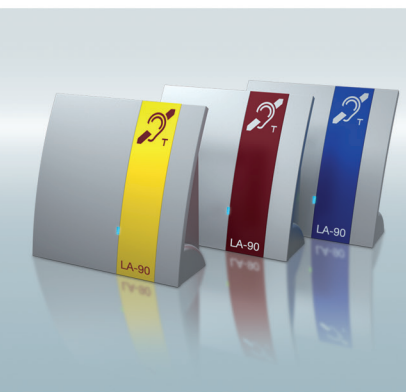

Además del micrófono integrado en el LA-90, es posible conectar un micrófono externo. Se consigue así una mayor libertad de colocación entre la persona que habla y su interlocuto.



El receptor de señales inductivas LPU-1 DIR, referencia de artículo A-4276-0 (imagen con cargador, referencia de artículo A-4977-0), transmite un sonido claro directamente a los oídos de las personas con problemas auditivos pero que no utilizan audífonos.



LA-90 SET: El microauricular permite una comunicación más discreta a las personas con problemas auditivos leves o incluso a personas con capacidad auditiva normal.



Sistema portátil de bucle inductivo para una comunicación sin restricciones.

El sistema de bucle inductivo »LA-90«, compacto y portátil, permite a las personas con audición reducida compartir la comunicación al transmitir la conversación directamente al audífono o a través de un receptor de bucle, por ejemplo el LPU-1 DIR. El »LA-90« está listo al instante: en un mostrador de recepción, una ventanilla de banco o un punto de venta, en definitiva, en cualquier lugar en el que la comunicación oral es imprescindible.

Su instalación no es nada complicada, ya que con unas pocas conexiones el dispositivo está listo para su uso. El »LA-90« puede recibir el sonido mediante el micrófono

integrado, aunque también se puede conectar un micrófono externo. La señal acústica se transforma en señales inductivas que se transmiten a través del bucle incorporado. Los audífonos provistos de bobina de inducción (selector en posición T o MT) o algunos receptores especiales de bucle inductivo pueden recibir estas señales inductivas. El »LA-90« también dispone de un conector para el uso de auriculares.

La señal acústica se transforma en señales inductivas que se transmiten a través del bucle incorporado. Los audífonos provistos de bobina de inducción (selector en posición T o MT) o algunos receptores especiales de bucle inductivo pueden recibir estas señales inductivas.

El »LA-90« también dispone de un conector para el uso de auriculares.

LA-90 SET: Todo lo que necesita para un uso profesional.

El »LA-90 SET« incluye el LA-90, un micrófono de sobremesa y un microauricular con su soporte especial.

Es ideal en entornos que requieran una comunicación absolutamente discreta.

También es adecuado para las personas con audición normal.



»LA-90 Set« Ref. A-4211-0

LA-90: Especificaciones		
Referencia LA-90	A-4209-0	Incluye 2 tiras de color intercambiables
Referencia LA-90 SET	A-4211-0	Incluye LA-90, micrófono de sobremesa, microauricular, soporte para microauricular, cable de conexión
Alcance de transmisión:	1 m	
Dimensiones:	Al. x An. x F: 200 x 185 x 70	
Peso:	635 g (batería recargable incluida)	
Sensibilidad del micrófono:	Hasta 60 dB	
Alimentación eléctrica:	Adaptador de corriente de 100-240 V, 50/60 Hz, 16 VDC o batería interna recargable de 12 V, 1300 mAh para uso portátil	
Cable del adaptador de corriente:	1,8 m	
Potencia:	2 x 5 W (máx. 10 W)	

Consulte a su distribuidor autorizado si necesita un asesoramiento más completo y profesional.

